




شرکت پایا اکسیر نشاط

آسان فیکس دست بلند :

این محصول برای صدمات ناحیه ساعد و آرنج دست استفاده میشود و بدلیل نداشتن جای انگشت شست برای هردو دست میتوان استفاده نمود ، زاویه آرنج آن ۹۰ درجه و دارای سه کمربند می باشد

مراحل نصب :

- ۱- ابتدا کمربندهای آسان فیکس را آزاد و در انتهای ترین نقطه اتصال به بدنه بصورت وارونه وصل کنید (تصویر ۱)
- ۲- دست مصدوم را بگونه ای که کف دست بطرف پایین باشد و آرنج در انتهای ترین نقطه افقی آسان فیکس قرار گیرد در آسان فیکس قرار دهید (تصویر ۲)
- ۳- کمربندها را تا جای که بین عضو و آسان فیکس فضای خالی وجود نداشته باشد جمع و در محل مورد نظر فیکس کنید (تصویر ۳)

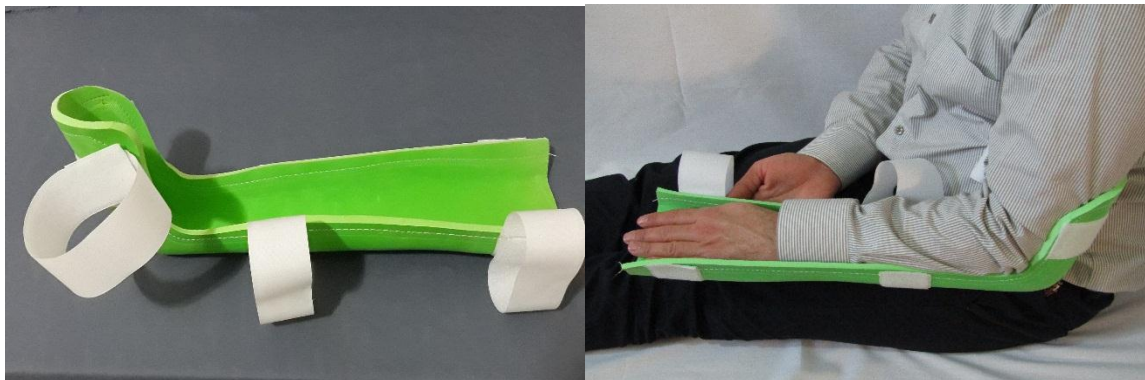

تصویر ۱

تصویر ۲



تصویر ۳