




شرکت پایا اکسیر نشاط

آسان فیکس پای کوتاه :

این محصول برای صدمات ناحیه پنجه و مچ پا استفاده میشود و برای هر دو پامی توان استفاده نمود ، زاویه پنجه پا ۹۰ درجه و دارای سه کمر بند می باشد

مراحل نصب :

- ۱- ابتدا کمر بندهای آسان فیکس را آزاد و در انتهای ترین نقطه اتصال به بدنه بصورت وارونه وصل کنید (تصویر ۱)
- ۲- پای مصدوم را به گونه ای که پاشنه پا در انتهای ترین نقطه افقی آسان فیکس قرار گیرد در آسان فیکس قرار دهید (تصویر ۲)
- ۳- کمر بندها را تا جای که بین عضو و آسان فیکس فضای خالی وجود نداشته باشد جمع و در محل مورد نظر فیکس کنید (تصویر ۳)

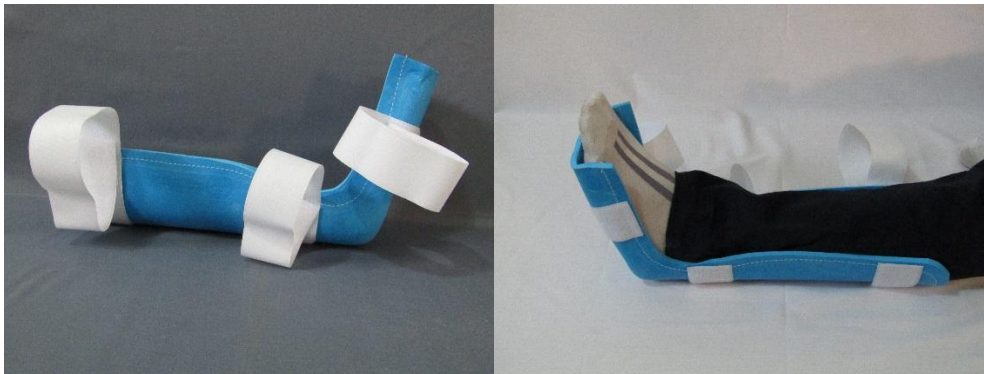

تصویر ۱

تصویر ۲



تصویر ۳