



شرکت پایا اکسیر نشاط

آسان فیکس کمر :

این محصول برای صدمات ناحیه ستون فقرات استفاده میشود که دارای ۵ کمر بند می باشد

مراحل نصب :

- ۱- ابتدا کمر بندهای آسان فیکس را آزاد و در انتهای ترین نقطه اتصال به بدنه بصورت وارونه وصل کنید (تصویر ۱)
- ۲- مصدم را به جهت چپ یا راست روی پهلو قرار داده و سپس آتل را بگونه ای که برجستگی باسن در جای مورد نظر قرار گیرد روی بدن نصب کنید (تصویر ۲)
- ۳- کمر بندها را تا جای که بین عضو و آسان فیکس فضای خالی وجود نداشته باشد جمع و در محل مورد نظر فیکس کنید سپس مصدوم را به پشت برگردانید (تصویر ۳)



تصویر ۱



تصویر ۲



تصویر ۳